

ANTI BRUIT MUSICIEN DLO ET EAR MONITOR DS 11

Caractéristiques techniques

ANTI BRUIT MUSICIEN DLO

Système de sonorisation intra-auriculaire innovant et sur mesure pour les musiciens avec filtre DM pour une atténuation linéaire et une restitution parfaite sur toute la plage de fréquences.

AVANTAGES

- Bonne communication même sans enlever la protection
- Dynamique musicale sans perte dans les fréquences aigües
- Courbe de réponse parfaite sur toute la plage des fréquences
- Nombreuses possibilités d'utilisation



Comparaison entre un filtre DM et un filtre Elacin ER



**2 PRODUITS
SUR 1 MÊME
EMBOUT !**

EAR MONITOR DS 11


Écouteur hi-fi spécialement conçu pour être utilisé comme système de monitoring intra-auriculaire par les musiciens professionnels ou comme simple écouteur par les amateurs.

AVANTAGES

- Réduction des bruits parasites grâce aux embouts souples sur mesure
- Restitution équilibrée de la voix avec basses naturelles
- Restitution exceptionnelle de la musique

Atténuation	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	H	M	L	SNR
code couleur noir	26	26	25	24	24	23	27	24	24	25	26
code couleur blanc	20	20	18	18	17	17	19	17	18	18	19
code couleur bleu	13	14	14	14	15	17	19	16	15	14	17

Les excellentes caractéristiques acoustiques se reflètent dans le déroulement de l'atténuation.

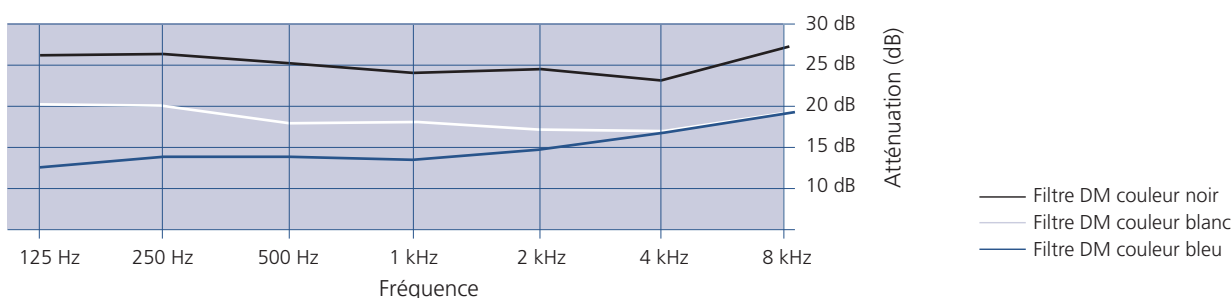

PRÉCAUTIONS D'USAGE

- Contrôlez régulièrement les embouts pour vous assurer qu'ils sont en parfait état
- Parfaitement adapté à une utilisation sous un casque de chantier
- Votre bouchon de protection sur mesure ne peut assurer sa haute protection contre le bruit que correctement mis en place et porté de façon continue en milieu bruyant
- Lorsque vous n'utilisez pas les bouchons, conservez-les dans leur étui d'origine et lavez les à l'eau savonneuse avant de les désinfecter avec lingettes conçues à cet effet et disponibles chez votre audioprothésiste

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE

- Avec les mains propres, retirez l'embout de son emballage.
- Prenez l'embout entre le pouce et l'index et enfoncez-le délicatement avec une légère rotation.
- Pour faciliter l'insertion, tirez l'oreille vers le haut et l'arrière pendant la mise en place de l'embout.

TYPES D'UTILISATION / UTILISATEURS

- Milieu musical
- Protection aquatique

CONFORT DE VIE

- Lavable et réutilisable
- Protection totale contre le bruit
- Réalisé sur mesure et en matière souple pour le plus grand confort d'utilisation
- Manipulation rapide et aisée
- Multi-usage et haut degré de protection

UTILISATION / ENTRETIEN / ADAPTATION

- Utilisation facile
- Les embouts sont reliés par un cordon de liaison amovible
- Les embouts doivent être nettoyés à l'eau savonneuse ou avec une lingette antiseptique nettoyante
- Contrôler toujours les bouchons pour s'assurer de leur état
- Porter les bouchons durant toute l'exposition au bruit
- Pour une parfaite utilisation, le renouvellement est conseillé dans un délai maximum de 2 ans

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN & DE NETTOYAGE

- Bombe spray nettoyante
- Lingettes antiseptiques nettoyantes
- Comprimés de nettoyage pour embouts

OPTIONS

- Couleurs spéciales unies, fluorescentes ou multicolores
- Marquage à droite et à gauche
- Anneau et cordon





Certificate

Certificate no.: 13/0503ab

This certificate authorises

LNEA Srl., Eaubonne, France
Mr. Sulejmani Gazil

to produce the DLO® Silicone hearing protection with
DM filter, to mark it with a CE-sign and to sell the hearing protection
called DLO® in France.

*(The application for type certification was filed with the Notified Body PZT GmbH in Wilhelmshaven
Type protection was issued on October 17th 2012)*

(Certificate no.: 081202)

Dino Marchetti
Sales Director
Dreve Otoplastik GmbH
Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Straße 31
39423 Unna - Tel. Sa.-Nr. 02303-8807-0

Unna, March 5th 2013