

Profitez pleinement de nos
PROTECTIONS AUDITIVES
ANTI-EAU



L'effet immédiat



BOUCHONS D'EAU

Les bouchons anti-eau sont indispensables pour protéger les oreilles lors de la baignade, des sports aquatiques ou même sous la douche. En empêchant l'eau de pénétrer dans le conduit auditif, ils aident à prévenir les infections souvent causées par une humidité excessive.

❗ **Empreinte parfaite exigée pour éviter les infiltrations d'eau causant des otites.**

LES BOUCHONS D'EAU FLOTTANT ET NON-FLOTTANT

Les embouts auriculaires en silicone, utilisés comme bouchons d'eau, se déclinent en deux types : non-flottants et flottants. Les modèles non-flottants sont plus denses et offrent un bon maintien, mais ne flottent pas dans l'eau. Ils sont disponibles dans une large gamme de coloris pour répondre aux préférences personnelles. En revanche, les bouchons flottants, grâce à l'ajout de micro-bulles dans le silicone, sont plus légers et peuvent flotter, ce qui les rend plus pratiques en cas de perte dans l'eau. Dans les deux cas, le silicone garantit confort et efficacité pour protéger les oreilles de l'eau.



- ✓ **Conception sur-mesure** : parfaitement adaptés à votre oreille.
- ✓ **Silicone souple** : garantit un port agréable et doux pour la peau.
- ✓ **Confort prolongé** : port agréable durant tout le temps où l'embout est porté.
- ✓ **Protection totale** : bloque efficacement l'eau
- ✓ **Durabilité** : lavables et réutilisables pour une utilisation durable.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE DE L'EMBOUT



- Avec les mains propres, retirez l'embout de son emballage ;

- Repérez le côté droit et le gauche ;



- Prenez l'embout entre le pouce et l'index et insérez le délicatement dans le conduit auditif en effectuant de légères rotations;

- Pour faciliter l'insertion, tirez l'oreille vers le haut et l'arrière pendant la mise en place de l'embout ;

- Vérifiez que la protection est bien en place et ajustée ;



Ainsi, vous bénéficierez d'une sécurité optimale lors d'expositions à des niveaux sonores élevés.


CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Portez les anti-bruit durant tout le temps d'exposition au bruit.
- Nettoyez les embouts à l'eau savonneuse ou avec une lingette antiseptique nettoyante.
- Lorsque vous ne portez pas les embouts, conservez-les dans leur étui d'origine/pochette souple.
- Contrôlez toujours les anti-bruit pour s'assurer de leur état.
- Pour un confort et une performance optimale, pensez à renouveler vos embouts tous les 2 ans au maximum.



CARACTÉRISTIQUES DES BOUCHONS D'EAU

Forme

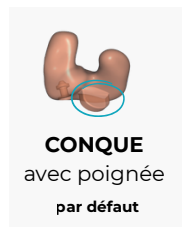

Types de silicone

Non-flottant : Pour un large choix de coloris
par défaut

Flottant : Constitué de micro-bulles, ce qui donne un embout allégé -> flottant

Matières et Coloris

		Transp. par défaut*	Rosé transp.	Marron transp.	Marron foncé	Rouge	Bleu	Blanc	Beige	Noir	Vert	Jaune	Orange	Rose bonbon	Rose fushia	Violet
Silicone non-flottant	25sh	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	40sh par défaut	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
	60sh	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Silicone flottant		✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Options

- Paillettes
- Mélange de couleurs
- Points de couleur
- Gravure laser

Accessoires complémentaires

- Cordons de liaison en PVC amovible (rouge, bleu, transparent, jaune)
- Cordon à attache
- Pince pour cordon
- Étui souple
- Étui étanche
- Bandeau piscine

Découvrez tous nos produits sur notre site
www.lnea-audition.com

☎ 01 34 67 67 17

✉ contact@lnea-audition.com
commande3d@lnea-audition.com

📍 19 Avenue de l'Eguillette,
95310 Saint-Ouen l'Aumône